

## Gebrauchsanweisung für Produkte mit 2liftu Aufstehhilfsfunktion.

Die 2liftu Aufstehhilfsfunktion kann Sie und Ihre Betreuer fantastisch im Alltag entlasten. Sitzmöbel mit 2liftu Aufstehhilfsfunktion sind keine medizinischen Produkte! Menschen mit eingeschränkter Muskulatur, werden durch die Hubkraft unter der Sitzfläche, in 6 einstellbaren Kraftstufen, sowohl beim Hinsetzen als auch beim wieder Aufstehen stark entlastet. Da es sich um starke mechanische Kräfte handelt, welche nur kontrolliert genutzt werden dürfen, sind 2liftu Möbel, unbeaufsichtigt auch ausschließlich von Menschen zu benutzen, welche im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte sind.

Die 2liftu Produkte besitzen Musterschutz: European Community design Nr. 008028146-0001



### Vor Benutzung:

**Lesen Sie diese Anleitung aufmerksam insbesondere die auf Seite 2 beschriebenen 4 wichtigen Sicherheitshinweise!**

Diese **Sicherheitshinweise** bleiben **IMMER** anzuwenden, damit mögliche Unfallgefahren ausgeschlossen sind. Vergewissern Sie sich auch, dass Ihr Fußboden nicht zu rutschige Oberflächen hat, und der Stuhl stabil auf dem Boden steht. Ansonsten ggf. unter die Stuhlfüße Filze oder Antirutschgleiter aus dem Baumarkt anbringen. Während der Nutzung, vermeiden Sie es, die Hände unter den Sitz oder in die Nähe des Mechanismus zu bringen. Kindern den Zugriff unbedingt verwehren. Belassen Sie die Mechanik zunächst auf Werkseinstellung (die schwächste Stufe) und trainieren Sie die Nutzung ihrer 2liftu Aufstehhilfsfunktion einige Male bei minimaler 2liftu-Unterstützung. Verstellen Sie erst anschließend in einzelnen Kraftstufen weiter, bis Sie die für Ihr Körpergewicht und -Größe komfortabelste Einstellung gefunden haben.


Hinweis:

- ↗ Einstellung „oben“ unter der Sitzfläche = Kraftstufe = Körpergewicht
- ↘ Einstellung „unten“ im Möbelgestell = Sitzneigung = Körpergröße




## BEACHTEN SIE DIE 5 FOLGENDEN WICHTIGEN SICHERHEITSHINWEISE

1. Achten Sie besonders darauf, **dass Kinder nicht in der Nähe** sind und sich spielenderweise verletzen.

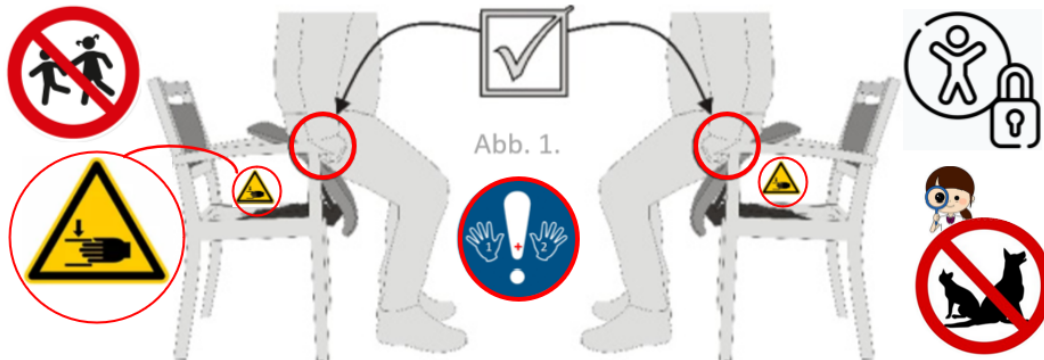

2. Beim **Hinsetzen und Aufstehen IMMER beide Hände** an die Armlehnen! (Abb. 1) Ansonsten besteht die Gefahr, dass Sie den Stuhl nach hinten wegdrücken könnten!
3. **Keine** eigenen oder auch dritter Personen, **Finger - Hände oder andere Gliedmaßen**, in den **beweglichen Bereich** des 2liftu Mechanismus. **Quetschgefahr!**
4. Beim Hinsetzen, hintere Gesäßkante **circa mittig der Sitzfläche** und nicht zu weit an die Hinterkante heran! (Abb.2) Ansonsten besteht die Gefahr, dass Sie beim Hinsetzen mit Ihrem Rücken an die Lehne stoßen bevor die Sitzfläche ganz abgesenkt ist. Die Sitzfläche kann sich dann nicht ganz waagrecht öffnen, und Sie werden keinen guten Sitzkomfort genießen können.

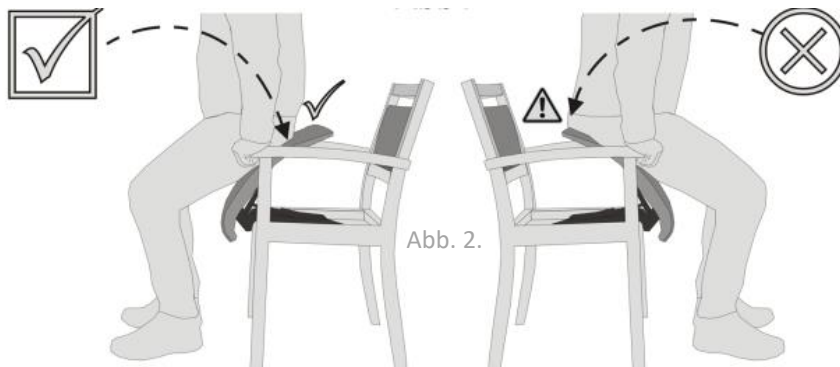

5. Bei allen 2liftu Sitzmöbeln ist darauf zu achten, dass Haustiere sich nicht unter dem offenstehenden Sitz ein gemütliches Ruheplätzchen eingerichtet haben. Insbesondere besteht diese Gefahr bei den Polstermöbeln, welche für Katzen und kleinere Hunde eine „scheinbar aber trügerisch“ willkommene neue Schlafstelle bieten würden. Ihrem Haustier zu liebe, schauen Sie immer nach ob kein ungebetener Gast unter dem Sitz schläft. Wir weisen jede Verantwortung von uns ab, sollte es zu Verletzungen oder Tod eines Haustieres kommen!

## Einstellung des Sitzkomforts und der Unterstützungskraft

Stellen Sie die 2liftu Aufstehhilfsfunktion auf nur so viel Hilfskraft wie wirklich nötig. (Abb.3 und 4)  
Ansonsten besteht die Gefahr, dass Sie womöglich, nicht bequem sitzen werden (zu starker Druck), oder Ihre Muskulatur durch zu wenig Beanspruchung, immer weiter abschwächt. Die „2liftu Aufstehhilfsfunktion“ kann und soll Ihnen „Helfen“, und Sie und Ihre Betreuer im Alltag beim „Helfen, helfen“.

**2liftu wird unterstützen, aber keinesfalls kann 2liftu Ihre Muskulatur ersetzen.**

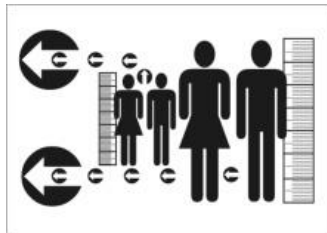


Abb.3



Abb.4

Beim Aufstehen, senkrechte Körperhaltung einnehmen! Bedenken Sie immer, dass ab nun die „2liftu Aufstehhilfsfunktion“ mit, je nach Einstellung, bis zu 60Kg Hubkraft ihrem Körper abfedert oder wieder hochhilft, und Sie durch diese Hilfe wieder einfacher aufstehen können. Nutzen Sie Ihren natürlichen Körperschwerpunkt. Üben Sie einige Male mit der leichtesten Einstellung. Ansonsten besteht die Gefahr, dass Sie z B. nach vorne gebeugt, von der Sitzfläche auch noch vorne gedrückt werden, und die Kontrolle über ihre Haltung verlieren.

## Einstellung des 2liftu Automaten auf Ihre Körpereigenschaften

Sorgen Sie für gute Beleuchtung des Mechanismus unter der Sitzfläche. Stellen Sie sich vor den Stuhl und ziehen sie die Sitzfläche auf sich zu, sodass sie guten Zugriff auf die Einstelltechnik haben. (Abb.5)



Abb.5

Lösen sie als erstes den für die Körpergröße vorgesehenen Stellbolzen im Sitzmöbel (Abb.6), indem Sie den Sicherheitsspint lösen und den Bolzen herausziehen. (Abb. 7)

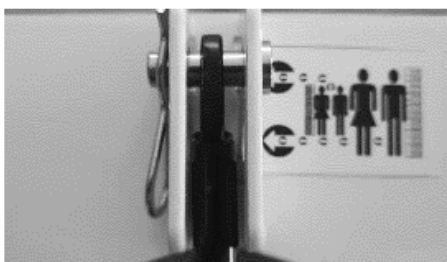


Abb.6




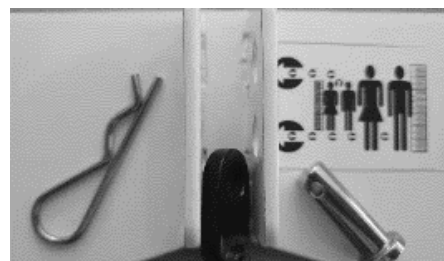


Abb.7



Lösen sie anschließend den für Körpergewicht vorgesehenen, unter der Sitzfläche befindlichen Stellbolzen (Abb. 8), und stellen Sie diesen auf eine Ihnen passendere Gewichtsstufe ein. (Abb.9: XS = Minimale, bis XXL für maximale Unterstützung). Sichern Sie anschließend wieder den Stellbolzen mittels der Sicherungssplintes. (Abb. 10)

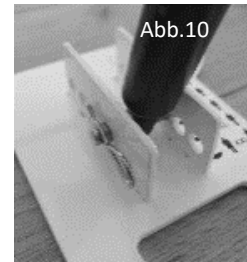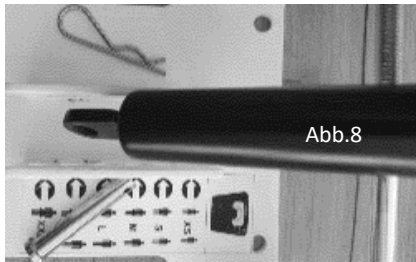

Sichern sie nun mittels der Sicherungssplintes, wieder die Druckfeder im Stuhlgestell. Gegebenenfalls können Sie hier auch noch auf die Maximale Körpergröße einstellen. (Abb.11.)

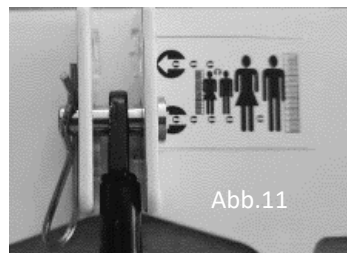

Testen Sie nun die Einstellungskraft, sowie den Sitzkomfort, und beachten Sie dabei die auf Seite2 vorgegebenen Sicherheitshinweise. Wiederholen Sie ggf. alle Griffe von Abb.5 bis 11, bis sie Ihre Idealeinstellung gefunden haben.

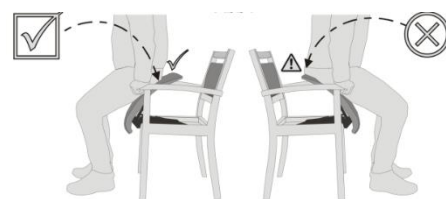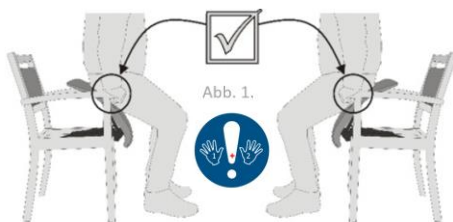

## Gewährleistung & Garantie:

Es gilt die in der EU gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistungspflicht von 2 Jahren.

Ausgenommen sind gebrauchsbewingter Verschleiß, sowie Schäden die durch unsachgemäße Anwendung oder Eigenverschuldung des Kunden entstanden sind.

Die Funktionalität des Beschlages sowie der Möbelgestelle garantieren wir während 5 Jahren. Auch hier gilt selbstverständlich ausgenommen, unsachgemäßen Gebrauchs und Eigenverschuldung.

## Pflege

Der 2liftu Mechanismus ist Wartungsfrei. Stauben sie ihn in regelmäßigen Abständen ab. Alle 2liftu Sitzmöbel sind pflegeleicht und können wie alle anderen Möbel regelmäßig mit einem mit lauwarmen Wasser angefeuchteten Tuch abgestaubt werden. Bei Bezugstoffen Klasse 3 mit Hospitaleignung, können ggf. andere Pflege und Reinigungsmittel angewendet werden. Sollten Sie hartnäckigere Flecken entstanden sein, (Rotwein, Ketchup, Kaffee, Blut, Urin usw.) sogleich reinigen. Informieren Sie sich bei [www.2liftu.com](http://www.2liftu.com) über die spezifischen Reinigungseigenschaften Ihres Bezugstoffes.

## **SICHERHEIT**

Der Hersteller übernimmt keinerlei Verantwortung für Schäden an Personen oder Gegenständen, die durch Nichteinhaltung der in dieser Anleitung genannten Vorschriften und Gebrauchsanweisungen entstanden sind.